



LBM BIONYVAL

## Préconisations Recueil Urines ECBU

DE-PREAN-MU0-010-v01

### Pré-traitement des urines pour l'ECBU

Processus concerné : Pré analytique (ECBU)


**Objet :** Le protocole ci-dessous décrit la marche à suivre pour l'utilisation des pots à urine avec canule de transfert intégrée (bleu) et tube à percuter (bouchon kaki).

- 1) Après avoir identifié le flacon stérile, le donner au patient en l'avertissant **de ne pas introduire le doigt sous la languette !**



- 2) Après le recueil, fermer le pot

Puis soulever la languette et percuter le tube

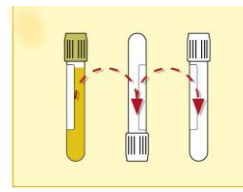

- 3) **Identifier le tube** et le faire parvenir au laboratoire à température ambiante dans un délai < 48 heures.



*Attention : si chimie urinaire demandée, transmettre également le flacon dans un délai < 2 heures.*

**NB :** Si la quantité **d'urine recueillie est < 10 mL** (cf. graduation) adresser **le flacon de départ** dans les **2 heures** au laboratoire à température ambiante.

